

Vividrin® Ectoin® nosový sprej

Pozorne si prečítajte túto písomnú informáciu skôr, ako začnete používať zdravotnícku pomôcku **Vividrin® Ectoin® nosový sprej**. Nevyhadzujte túto informáciu pre používateľa, pretože obsahuje dôležité informácie. V prípade ďalších otázok ohľadom zdravotníckej pomôcky **Vividrin® Ectoin® nosový sprej** sa obráťte na svojho lekára, lekárničku alebo splnomocneného zástupcu.

1. Čo je Vividrin® Ectoin® nosový sprej na čo sa používa

- Vividrin® Ectoin® nosový sprej** je zdravotnícka pomôcka, ktorá obsahuje Ectoin®, prírodnú molekulu, ktorá chráni bunky, potláča zápal a stabilizuje nosovú sliznicu.
- Vividrin® Ectoin® nosový sprej** sa používa na liečbu a prevenciu príznakov alergickej nádchy (svrbenie z nosa). Môže zmierniť typické príznaky ako svrbenie nosa, nádchu, kýchanie a upchatie nos.
- Vividrin® Ectoin® nosový sprej** je mierne hyperionický roztok, ktorý chráni pred škodlivými vplyvmi alergénov. To uľahčuje regeneráciu citlivej nosovej sliznice.
- Vividrin® Ectoin® nosový sprej** neobsahuje konzervačné látky a je vhodný pre deti.

2. Upozornenia a opatrenia

- Nepoužívajte **Vividrin® Ectoin® nosový sprej** po operáciách alebo zraneniach nosa.
- Nepoužívajte **Vividrin® Ectoin® nosový sprej** v prípade precitlivosti na Ectoin® alebo ktorúkoľvek pomocnú látku nosového spreja.
- V prípade výskytu alergickej reakcie ihneď ukončíte používanie **Vividrin® Ectoin® nosový sprej**.
- Aby bola zaistená bezpečná hygiena, musí byť každá fľaštička nosového spreja používaná iba jednou konkrétnou osobou.
- Po otvorení nepoužívajte dlhšie ako 6 týždňov.

3. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Vividrin® Ectoin® nosový sprej

Nie sú známe žiadne interakcie medzi zdravotníckou pomôckou **Vividrin® Ectoin® nosový sprej** a inými nosovými sprejmi.

4. Tehotenstvo a dojčenie

V súčasnosti nie sú k dispozícii žiadne údaje týkajúce sa používania **Vividrin® Ectoin® nosového spreja** počas tehotenstva a dojčenia. Poradte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom pred použitím tejto zdravotníckej pomôcky:

- ak ste tehotná alebo dojčíte;
- ak si myslíte, že ste tehotná alebo plánujete otehotnieť.

5. Ako používať Vividrin® Ectoin® nosový sprej

Vždy používajte túto zdravotnícku pomôcku v súlade s návodom na použitie. Ak si nie ste ničím istý, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.

Pokiaľ váš lekár neurčí inak, aplikujte 1-2 vstreky do každej nosovej diery niekoľkokrát denne.

Deti vo veku do 10 rokov, by mali používať **Vividrin® Ectoin® nosový sprej** za asistencie dospeljej osoby.

Pred prvým použitím **Vividrin® Ectoin® nosový sprej** odstráňte ochranný kryt a stlačte 2- až 3-krát kvôli uvoľneniu vzduchu v pumpičke. Hrot dýkovača nerezte. Ak je funkcia rozprašovania znížená (čo môže nastať, pokiaľ nie je fľaštička umiestnená vo zvislej polohe), stlačte niekoľkokrát mechanizmus pumpičky vo zvislej polohe.

1. Vyfúkajte si nos, aby ste si vyčistili nosovú dierku.
2. Odstráňte ochranný kryt z fľaštičky.
3. Držte fľaštičku končekmi ukazováka a prostredníka, zospodu palcom. Mierne predkloníte hlavu a nosovú dierku zapchajte prstom miernym stlačením nosa.
4. Začnite jemne vdychovať druhou nosovou dierkou.
5. Pre vstreknutie do nosovej diery rýchlo a silno stlačte pumpičku. Pokračujte v dýchaní cez nosovú dierku.

6. Vložte hrot spreja do druhej nosovej diery.
7. Zapakujte body 3 až 5 pri druhej nosovej diere.
8. Utrite hrot spreja čistou látkovou vreckovkou.
9. Nasadte ochranný kryt.

6. Možné vedľajšie účinky, Vividrin® Ectoin® nosový sprej

Vividrin® Ectoin® nosový sprej je veľmi dobre znášaný. Doteraz nie sú známe žiadne vyskytujúce sa alebo pretrvávajúce vedľajšie účinky.

Obráťte sa na svojho lekára, lekárničku alebo splnomocneného zástupcu, ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré sú spojené s používaním **Vividrin® Ectoin® nosový sprej**. Ak príznaky pretrvávajú alebo sa zhoršia, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárničku.

7. Ako uchovávať Vividrin® Ectoin® nosový sprej

Nepoužívajte po dátume expirácie. Dátum expirácie zdravotníckej pomôcky **Vividrin® Ectoin® nosový sprej** je vyznačený na škatuľke a fľaštičke.

Uchovávajte pri teplote 2 °C – 25 °C. Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

8. Obsah balenia Vividrin® Ectoin® nosový sprej a ďalšie informácie

Dostupné veľkosti balenia: 20 ml roztoku vo fľaške.
Zloženie: Ectoin®, morská soľ a voda. Jeden vstretek obsahuje 0,14 ml roztoku.

Výroba

bitop AG
Stockumer Str. 28,
58453 Witten, Nemecko



Dátum poslednej revízie:
jún 2020

Vysvetlenie použitých symbolov :



CE značenie



Výrobca



Prosím, pozrite
návod na použitie



Pozor, prečítajte
si návod na
použitie (dôležité
a preventívne
upozornenia)



LOT číslo



Spotrebitel
do (dátum
expirácie)



Teplotné
obmedzenia